




# Skin repair & hydrating system



## PŘEDNÍ PANEL

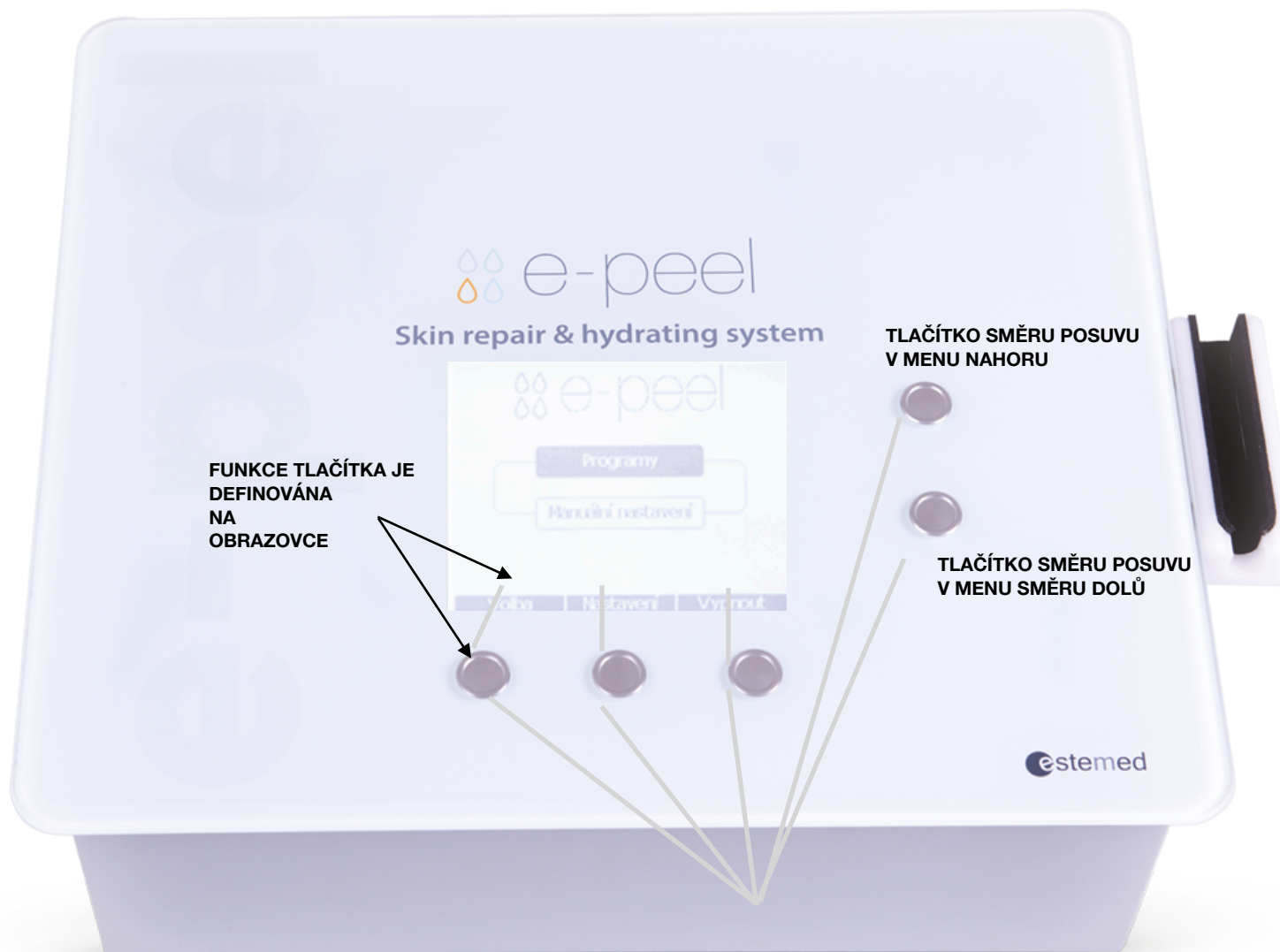


FUNKCE TLAČÍTKA JE  
DEFINOVÁNA  
NA  
OBRAZOVCE

TLAČÍTKO SMĚRU POSUVU  
V MENU NAHORU

TLAČÍTKO SMĚRU POSUVU  
V MENU SMĚRU DOLŮ

**PRO SPUŠTĚNÍ STROJE STISKNĚTE JAKÉKOLIV TLAČÍTKO**

## ZADNÍ PANEL

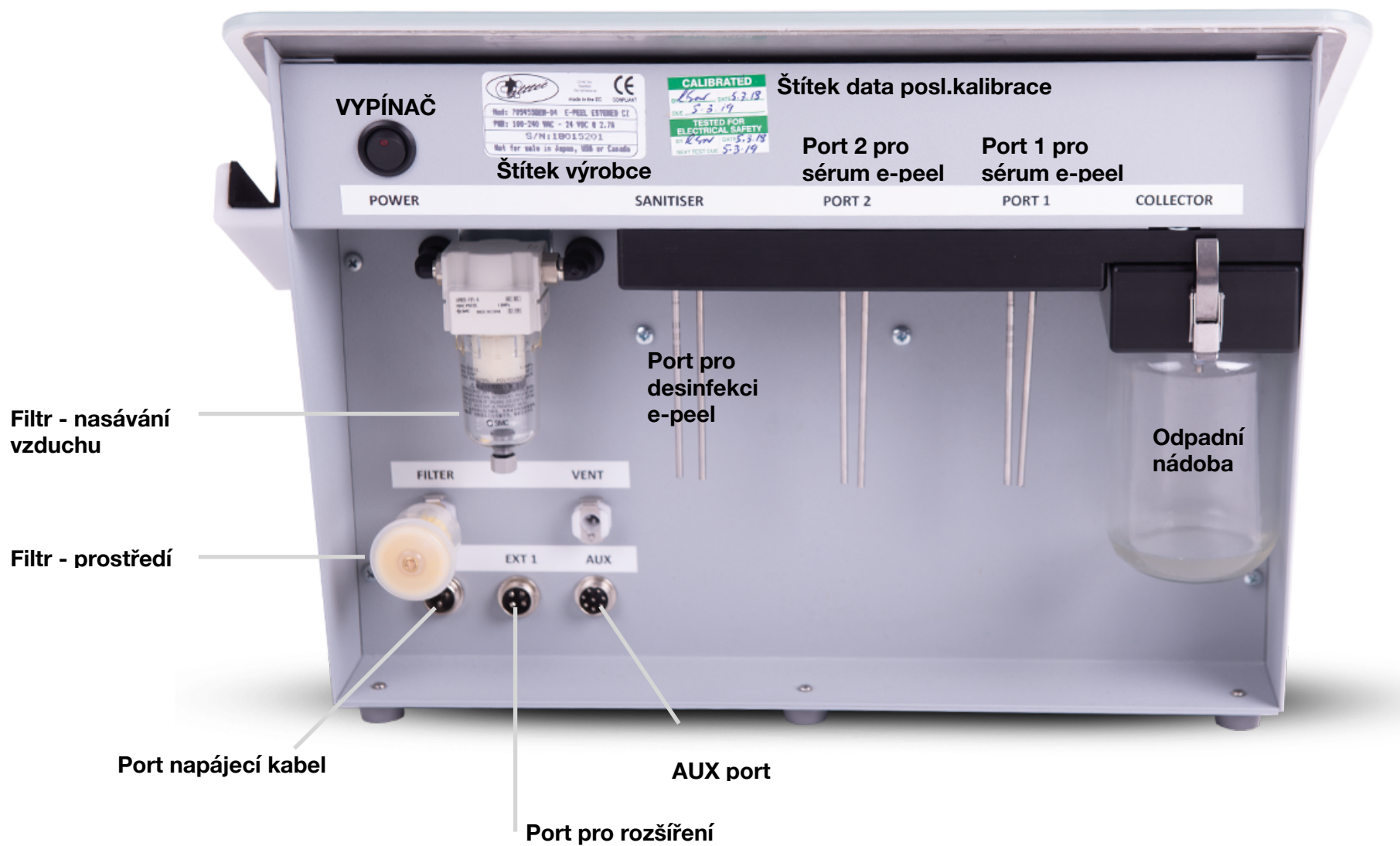

## INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ - ZADNÍ PANEL



Zavěste  
odpadní  
nádobu



Sklopte  
páčku směrem  
dolů - tím se  
uzavře



Do portu SANITISER vložte  
naplněnou nádobu s desinfekcí  
e-peel



Nainstalujte požadované sérum  
e-peel na příslušný port



Nainstalujte filtr prostředí



Připojte kabel síťového  
napájení




## ZADNÍ PANEL SE VŠEMI PŘIPOJENÝMI KONEKTORY



# SIDE PANEL

## BOČNÍ PANEL

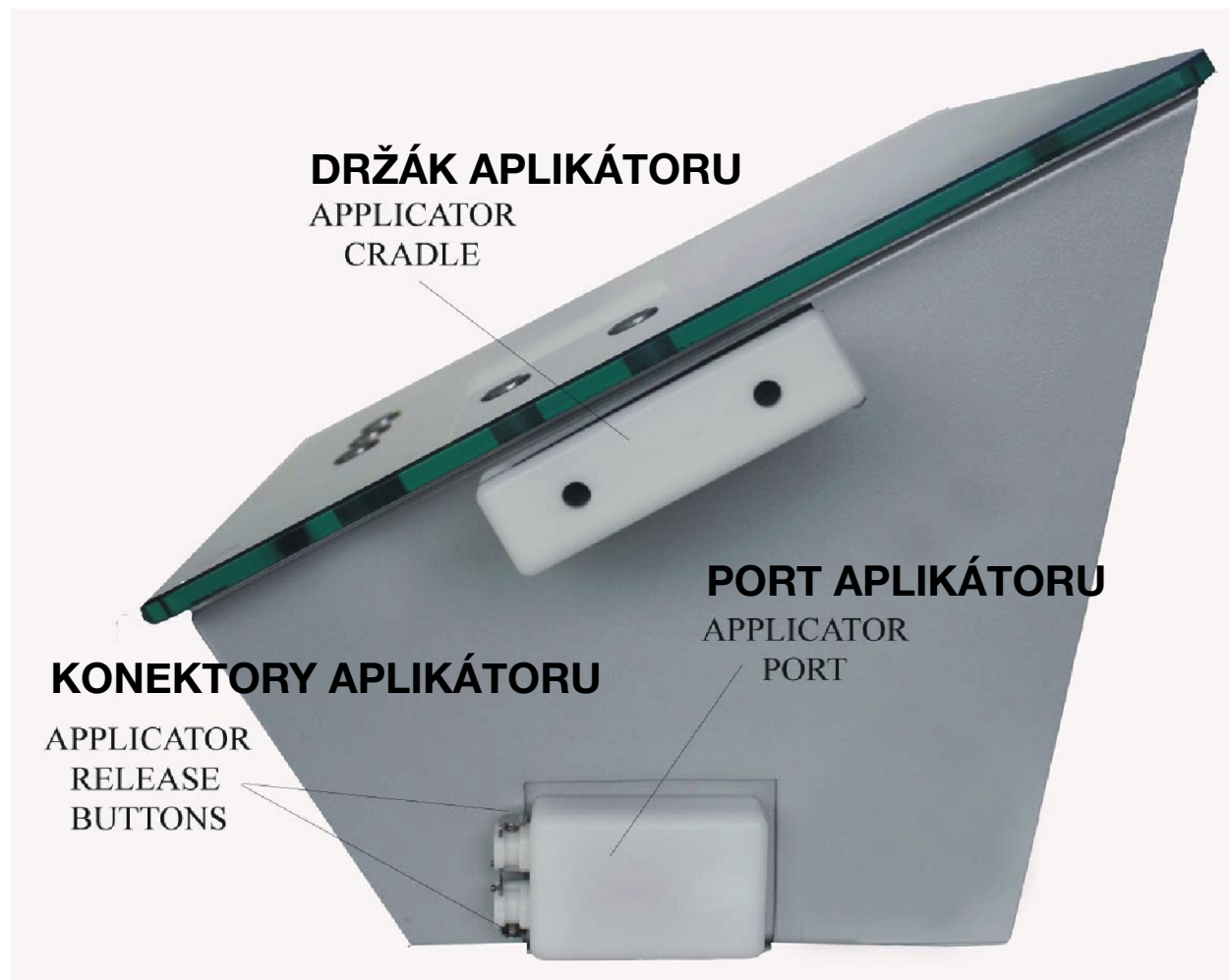

## PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ APLIKÁTORU



**ZATLAČTE DOKUD NEUSLYŠÍTE DVOJITÉ KLIKNUTÍ**



**STISKNĚTE VRCHNÍ A SPODNÍ TLAČÍTKO (OBĚ NAJEDNOU VIZ OBRÁZEK VÝŠE), VE STEJNÝ OKAMŽIK ODPOJTE APLIKÁTOR OD KONEKTORU**

## INSTALACE TĚLÍSKA APLIKÁTORU



**ZAŠROUBUJTE POŽADOVANÉ TĚLÍSKO VÝŠE UVEDENÝM ZPŮSOBEM DLE OBRÁZKŮ v pořadí 1, 2 a 3**



**NASAĎTE KLOBOUČEK DLE OBRÁZKU 4 a 5**

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ E-PEEL



SET APLIKÁTORU, TĚLÍSEK,  
KLOBOUČKU A UZÁVĚRU PRO  
ÚDRŽBU STROJE



ODPADNÍ NÁDOBA



NÁDOBA PRO  
SANITIZÉR E-PEEL



ZDROJOVÝ ADAPTER



NAPÁJECÍ KABEL



## PŘÍSLUŠENSTVÍ E-PEEL



ORIGINÁLNÍ STOLEK E-PEEL V CELOKOVOVÉM PROVEDENÍ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ E-PEEL



Hydratační sérum  
e-peel s kyselinou  
hyaluronovou &  
panthenolem  
125ml



Rozjasňující sérum  
e-peel s kyselinou  
kojovou, arbutinem  
& enkapsulovaným  
komplexem  
vitamínů A, C a E  
125ml



Sanitizér e-peel  
1000ml



Regenerační  
sérum e-peel  
s Vitamínem C a  
antioxidanty  
125ml



Čistící sérum  
e-peel s kyselinou  
salicylovou & aloe  
125ml



Skin repair  
hydrating cream  
50ml



# Skin repair & hydrating system

## KONTAKT

ESTEMED

Náhon 131/33

50009 Hradec Králové

Czech Republic

+420 777 722 182

[info@estemed.cz](mailto:info@estemed.cz)

[www.estemed.cz](http://www.estemed.cz)